

ATOMIZADOR TRAQUEAL DE MUCOSA VETERINÁRIO (RTI)

REGISTRO MAPA

Produto isento de registro no MAPA de acordo com o art.44 do regulamento aprovado pelo Decreto nº 5.053 de 22/04/2004, IN Nº 37 de 08/09/1999.

PRODUTO EXCLUSIVO PARA USO VETERINÁRIO

DADOS DO PRODUTO

Nome técnico: Atomizador Traqueal de Mucosa

Matéria Prima: Plug - Policarbonato

Irrigador - Policarbonato

Tubo - PVC

Conector - Policarbonato

Cabo - Aço

Produto Estéril: (X) Sim () Não

Método de Esterilização: Óxido de Etileno

Validade: 05 Anos

FABRICANTE RECOMENDA USO ÚNICO

DESCRIÇÃO

O Atomizador de Mucosa Veterinário é um dispositivo que permite administrar medicamentos como um spray atomizado. Indicado o uso por profissionais atuantes em procedimentos de emergência e/ou anestesia. O equipamento é fino e consistente para cobertura direta e direcionada do nariz, faringe, laringe e traqueia.

INDICAÇÃO DE USO

Administração de anestésico tópico na região de nariz, garganta, hipofaringe, cordas vocais e traqueia, antes da manipulação das vias aéreas, em procedimentos como a intubação, endoscopia, rinoscopia e exame do palato mole. O benefício é uma redução da sensação de engasgo, redução do pulso e resposta da pressão arterial à intubação. Adapta-se a qualquer seringa luer-lock. (Seringa não acompanha o material). O médico escolhe a medicação, a dose e o volume exatos (até 0,2 mL).

INSTRUÇÃO DE USO

- Abra a embalagem de forma asséptica;
- Preencha a seringa com o volume desejado de solução e elimine o ar restante;
- Conecte o dispositivo na seringa;
- Elimine o ar do tubo e dobre a extensão do tubo para a posição desejada;
- O tubo permanecerá na posição fixa;
- Coloque a ponta do dispositivo na cavidade da orofaringe;
- Comprima o êmbolo da seringa para borrifar a solução atomizada na cavidade da orofaringe;
- Descarte o dispositivo de acordo com protocolo da instituição.


APRESENTAÇÃO COMERCIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
TS000	ATOMIZADOR TRAQUEAL DE MUCOSA (VETERINÁRIO) 1UN (RTI)

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Comprimento: Tubo maleável de 6,5 polegadas (15cm) para deposição direcionada de medicamentos;
- Diâmetro: Ponta de 15Fr (4,7mm);
- Conexão: Luer;
- Seringa indicada: 5ml é recomendada para dosagem precisa e pressão adequada;
- Volume de preparação: 0,2 ml;
- Névoa de partículas: 50-80 microns.

FOTOS

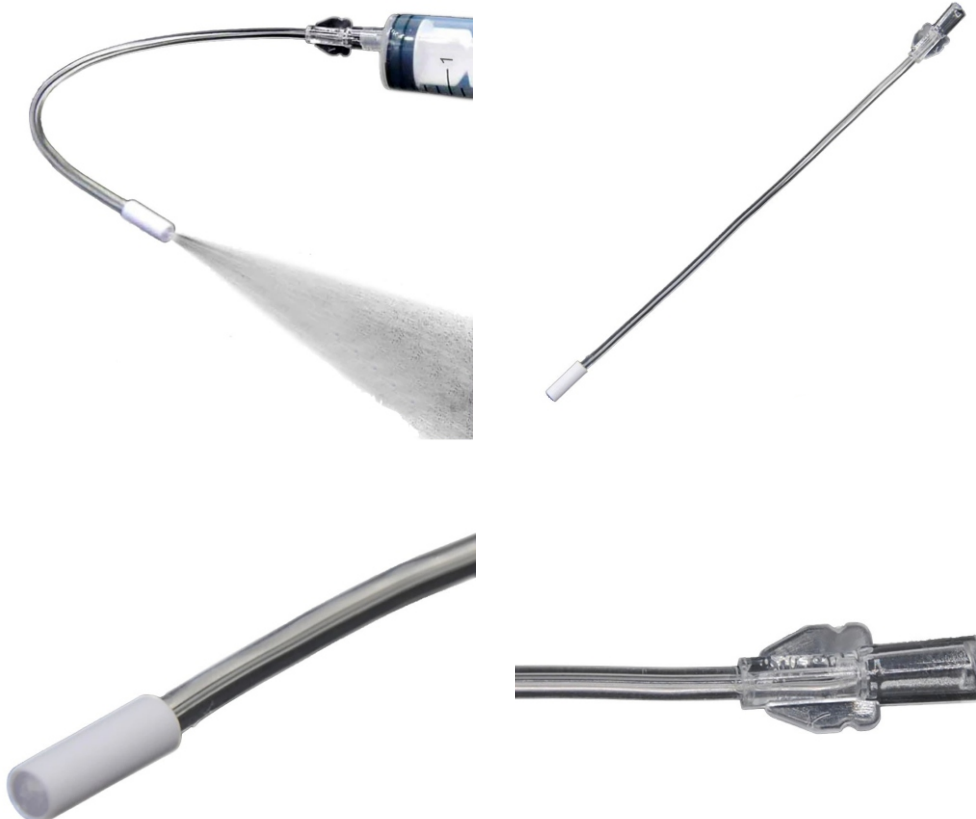

PRECAUÇÕES/ CONTRAINDICAÇÕES

- O fabricante recomenda o uso único;
- Estéril a óxido de etileno;
- Não utilizar se a embalagem estiver aberta ou danificada;
- Não utilizar após a data de validade;
- Esterilidade garantida, desde que a embalagem não esteja aberta ou danificada;
- Atóxico e apirogênico;
- Descarte o dispositivo de acordo com protocolo da instituição.

ARMAZENAGEM

O produto deve ser armazenado em local de boa ventilação, limpo, ao abrigo de luz, em temperatura ambiente, umidade inferior a 70%, livre de contaminação e sem nenhum gás corrosivo.

FORMA DE APRESENTAÇÃO DA EMBALAGEM

O Atomizador de Mucosa é embalado individualmente em papel grau cirúrgico, sua embalagem secundária são caixas de papel cartão, e a embalagem terciária são caixas de papelão.

IMPORTADO E DISTRIBUÍDO POR:**ROYAL TECH DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E VETERINÁRIA - LTDA**

Rua Professor João Soares Barcelos, 2085 - Hauer - Curitiba - PR

CEP: 81.670-080 | CNPJ: 25.239.410/0001-10

Site: www.royaltechimport.com.br

SAC (41) 99740-5140/ 3011-5509

E-mail: royaltech.vet.import@gmail.com

Resp. Téc.: Mv. Nicolas M. Pereira CRMV-PR 11.051

FABRICANTE:

Produto fabricado no China.