

BRAÇADEIRA VETERINÁRIA REUTILIZÁVEL 1TUBO (RTI)

REGISTRO MAPA

Produto isento de registro MAPA de acordo com art. 44 do regulamento aprovado pelo Decreto 5053 de 22/04/2004, IN 37 de 08/09/1999.

PRODUTO EXCLUSIVO PARA USO VETERINÁRIO

DADOS DO PRODUTO

Nome técnico: Braçadeira Veterinária Reutilizável

Matéria Prima: Braçadeira: Nylon

Velcro: Poliéster e Nylon

Válvula: TPU

Tubo: PVC

Conectores: Plástico

Produto Estéril: () Sim (x) Não

Validade: Indeterminada

DESCRIÇÃO

A braçadeira veterinária reutilizável da Royal Tech Import é confeccionada com componentes de alta qualidade para proporcionar uma aferição da pressão arterial não invasiva fidedigna. Possui na sua constituição 2 conectores diferentes por braçadeira que possibilita o uso em diversos esfigmomanômetros ou monitores multiparamétricos do mercado. Produto isento de látex.

INDICAÇÃO DE USO

As braçadeiras reutilizáveis veterinárias com 1 tubo são indicadas para auxiliar na aferição da pressão arterial não invasiva, por meio do uso de um doppler e esfigmomanômetro ou em conjunto com um monitor multiparamétrico.

INSTRUÇÕES DE USO

- A escolha da braçadeira correta para cada perfil de paciente evita uma aferição não fidedigna, assim evitando um tratamento inadequado;
- Coloque a braçadeira aberta em torno da face interna do membro a ser aferido a pressão;
- Posicione o símbolo de artéria (ARTERY) da braçadeira sobre a artéria presente nos membros anteriores, posteriores ou na cauda do paciente;
- Se a linha indicadora (INDEX LINE) estiver dentro da faixa indicadora da circunferência do membro (ALCANCE), a circunferência da braçadeira está adequada, do contrário selecione outra braçadeira mais apropriada para a circunferência do membro;
- Fixe a braçadeira confortavelmente rente ao paciente. Retire a braçadeira imediatamente após aferir a pressão arterial.

APRESENTAÇÃO COMERCIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
KITBVR	KIT BRAÇADEIRA VETERINÁRIA REUTILIZÁVEL (N.1 AO N.5) 1TUBO (RTI)
V0011N	BRAÇADEIRA VETERINÁRIA REUTILIZÁVEL (N.1 - 3-6CM) 1TUBO (RTI)
V0012N	BRAÇADEIRA VETERINÁRIA REUTILIZÁVEL (N.2 - 4-8CM) 1TUBO (RTI)
V0013N	BRAÇADEIRA VETERINÁRIA REUTILIZÁVEL (N.3 - 6-11CM) 1TUBO (RTI)
V0014N	BRAÇADEIRA VETERINÁRIA REUTILIZÁVEL (N.4 - 7-13CM) 1TUBO (RTI)
V0015N	BRAÇADEIRA VETERINÁRIA REUTILIZÁVEL (N.5 - 8-15CM) 1TUBO (RTI)
V0012C	BRAÇADEIRA VETERINÁRIA REUTILIZÁVEL (N.6 – 13.8-21.5CM) 1TUBO (RTI)

OBS: POSSUI 1UN DO CONECTOR SL E 1UN DO CONECTOR HP EM CADA BRAÇADEIRA

CONECTOR SL**CONECTOR HP**

*INCLUSO DOIS CONECTORES POR BRAÇADEIRA

FOTO:





BRAÇADEIRA N.1





COD	DESCRIÇÃO
1	Tecido composto de nylon azul escuro 70D
2	Tecido de velcro preto: C=50mm×L=15mm
3	Gancho de injeção de PVC preto: C=62mmxL=15mm
4	Válvula tipo bico de TPU transparente: ID = 2,5 mm, OD = 4 mm, H = 11 mm
5	Tubo de ar de PVC preto: diâmetro interno 3mm, diâmetro externo 6mm, comprimento do tubo 200mm

BRAÇADEIRA N.2

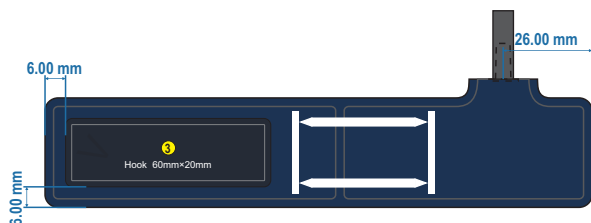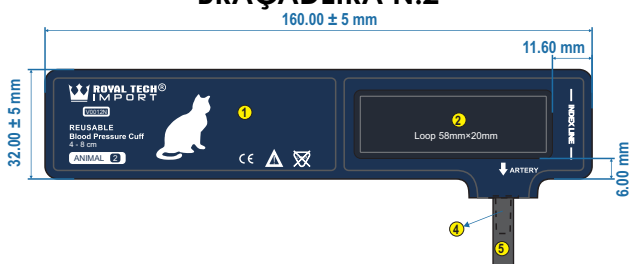


COD	DESCRIÇÃO
1	Tecido composto de nylon azul escuro 70D
2	Tecido de velcro preto: C=58mm×L=20mm
3	Gancho de injeção de PVC preto: C=60mmxL=20mm
4	Válvula tipo bico de TPU transparente: ID = 2,5 mm, OD = 4 mm, H = 11 mm
5	Tubo de ar de PVC preto: diâmetro interno 3mm, diâmetro externo 6mm, comprimento do tubo 200mm

BRAÇADEIRA N.3

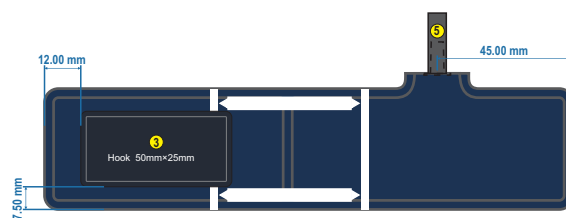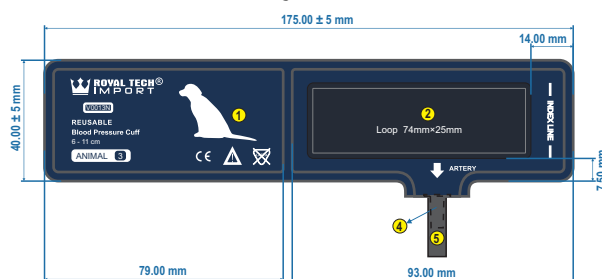


COD	DESCRIÇÃO
1	Tecido composto de nylon azul escuro 70D
2	Tecido de velcro preto: C=74mm×L=25mm
3	Gancho de injeção de PVC preto: C=50mmxL=25mm
4	Válvula tipo bico de TPU transparente: ID = 2,5 mm, OD = 4 mm, H = 11 mm
5	Tubo de ar de PVC preto: diâmetro interno 3mm, diâmetro externo 6mm, comprimento do tubo 200mm

BRAÇADEIRA N.4

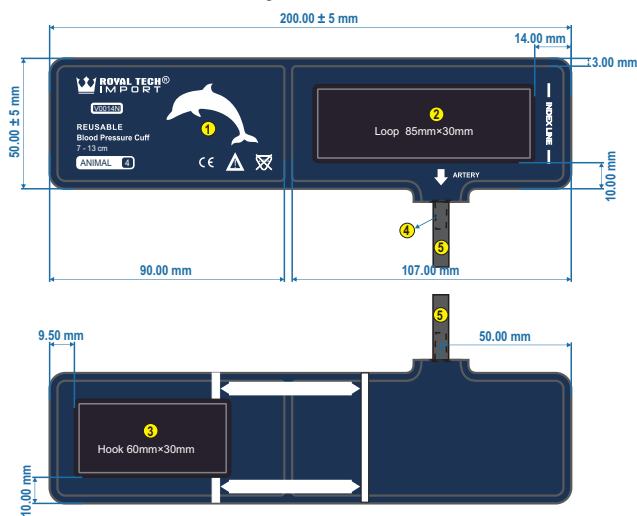

COD	DESCRIÇÃO
1	Tecido composto de nylon azul escuro 70D
2	Tecido de velcro preto: C=85mm×L=30mm
3	Gancho de injeção de PVC preto: C=60mmxL=30mm
4	Válvula tipo bico de TPU transparente: ID = 2,5 mm, OD = 4 mm, H = 11 mm
5	Tubo de ar de PVC preto: diâmetro interno 3mm, diâmetro externo 6mm, comprimento do tubo 200mm

BRAÇADEIRA N.5

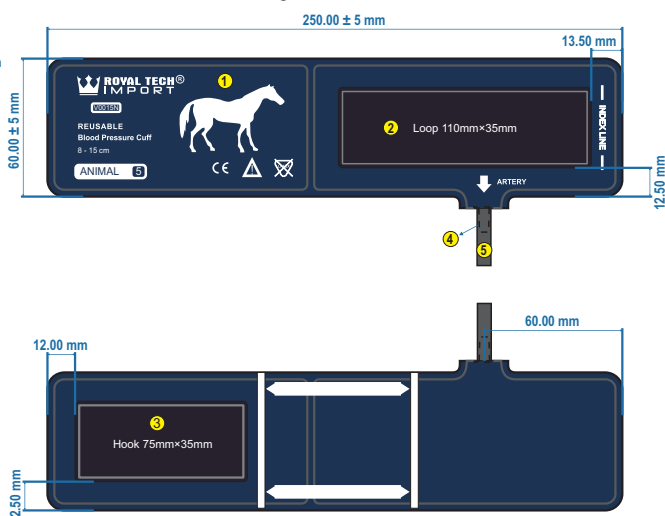


COD	DESCRIÇÃO
1	Tecido composto de nylon azul escuro 70D
2	Tecido de velcro preto: C=110mm×L=35mm
3	Gancho de injeção de PVC preto: C=75mmxL=35mm
4	Válvula tipo bico de TPU transparente: ID = 2,5 mm, OD = 4 mm, H = 11 mm
5	Tubo de ar de PVC preto: diâmetro interno 3mm, diâmetro externo 6mm, comprimento do tubo 200mm

COMPOSIÇÃO

- Isento de látex;
- Atóxico;
- Não Inflamável;
- Braçadeira - Nylon;
- Velcro - Poliéster e Nylon;
- Válvula - TPU;
- Tubo - PVC;
- Conectores - Plástico.

BRAÇADEIRA N.6

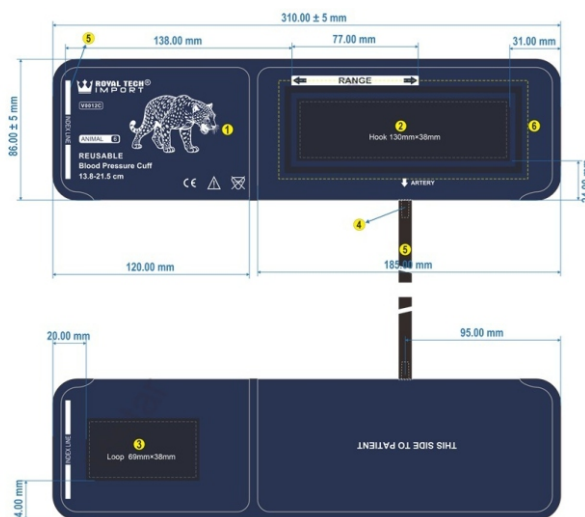

COD	DESCRIÇÃO
1	Tecido composto de nylon azul escuro 70D
2	Tecido de velcro azul escuro: C=130mm x L=38mm
3	Gancho de injeção de PVC azul escuro: C=69mmxL=38mm
4	Válvula tipo bico de TPU transparente: OD = 6.5 mm
5	Tubo de ar de PVC preto: diâmetro interno 4mm, diâmetro externo 8mm, comprimento do tubo 200mm

PRECAUÇÕES/ CONTRAINDICAÇÕES

- Em membros contendo acessos vasculares, ferimentos ou curativos não utilizar para o procedimento de aferição da pressão;
- A insuflação da braçadeira pode bloquear temporariamente a circulação do sangue, o que pode causar lesões ao paciente;
- Não use a braçadeira se houver qualquer sinal de dano do produto;
- Não movimentar o membro durante a aferição;
- Escolher com critério o tamanho correto da braçadeira;
- Observar se o tubo de conexão não está comprimido ou dobrado assim evitando a pressurização da braçadeira e possíveis lesões ao paciente.

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO

O produto deve ser armazenado em local de boa ventilação, limpo, ao abrigo de luz em temperatura ambiente, umidade inferior a 70%, livre de contaminação e sem nenhum gás corrosivo.

FORMA DE APRESENTAÇÃO DA EMBALAGEM

Embalagem primária: Saco plástico individual para cada braçadeira.
Embalagem secundária: Caixa de papel cartão (exclusiva do item: KITBVR).

GARANTIA

Garantia de 3 meses após o recebimento da mercadoria pelo cliente: (referente à garantia legal, nos termos do Art. 26, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor).

IMPORTADO E DISTRIBUÍDO POR:**ROYAL TECH DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E VETERINÁRIA - LTDA**

Rua Professor João Soares Barcelos, 2085 - Hauer - Curitiba - PR

CEP: 81.670-080 | CNPJ: 25.239.410/0001-10

E-mail: royaltech.vet.import@gmail.com

Site: www.royaltechimport.com.br

SAC (41) 99740-5140/ 3011-5509

Resp. Téc.: Mv. Nicolas M. Pereira CRMV-PR 11.051

FABRICANTE:

Produto fabricado na China.