

CONECTOR (PRN) LUER COM MEMBRANA VETERINÁRIO (RTI)

REGISTRO MAPA

Produto isento de registro no MAPA de acordo com o art.44 do regulamento aprovado pelo Decreto nº 5.053 de 22/04/2004, IN Nº 37 de 08/09/1999.

PRODUTO EXCLUSIVO PARA USO VETERINÁRIO

DADOS DO PRODUTO

Nome técnico: Plug Adaptador com Membrana Autocicatrizante
Matéria Prima: Plug em policarbonato e membrana em borracha sintética
Produto Estéril: (X) Sim () Não
Método de Esterilização: Óxido de Etileno
Validade: 5 Anos

FABRICANTE RECOMENDA USO ÚNICO

DESCRIÇÃO

O Plug Adaptador com Membrana Autocicatrizante é um dispositivo anexado a conjuntos de infusão / transfusão para adicionar medicamentos, realizar salinizações, e após o uso mantém barreira de fechamento evitando contato com o meio externo.

INDICAÇÃO DE USO

O Plug Adaptador com Membrana Autocicatrizante é um dispositivo indicado para o uso em conjuntos de infusão/ transfusão e cateteres intravenosos periféricos e centrais que se destinam à manutenção da permeabilidade da infusão intravenosa.

INSTRUÇÕES DE USO

- Abra a embalagem de forma asséptica;
- Certifique-se de que a tampa não toque a superfície externa da embalagem;
- Realize antissepsia na ponta do dispositivo a ser utilizado e conecte o adaptador. Quando conectar gire cerca de 2-3 vezes até que a conexão esteja firme o suficiente;
- Descarte o dispositivo de acordo com protocolo da instituição.

Nota: Realizar antissepsia na ponta do dispositivo antes e depois do uso.

APRESENTAÇÃO COMERCIAL

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO |
|--------|--|
| PRNRTI | CONECTOR (PRN) LUER COM MEMBRANA CX100UN (RTI) |

FOTO



Tampa Luer com Membrana

Dispositivo auxiliar para realizar a vedação de acessos bicos slip e/ou lock, evitando contaminações do meio externo no acesso de punção venosa periférica, **MANTENDO O SISTEMA FECHADO.**

LIVRE DE LÁTEX

ESTÉRIL



CAIXA COM
100
UNIDADES

***ISENTO DE LÁTEX**

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Comprimento: 18.35 mm;
- Diâmetro: 9.83mm;
- Conexão: Luer.

COMPOSIÇÃO

- Plug: Policarbonato;
- Membrana: Borracha sintética;
- Atóxico;
- Não Inflamável;
- Uso único.

PRECAUÇÕES/ CONTRAINDICAÇÕES

- O fabricante recomenda o uso único;
- Estéril a óxido de etileno;
- Não utilizar se a embalagem estiver aberta ou danificada;
- Não utilizar após a data de validade;
- Esterilidade garantida, desde que a embalagem não esteja aberta ou danificada;
- Atóxico e apirogênico;
- Descarte o dispositivo de acordo com protocolo da instituição.

ARMAZENAGEM

Armazenar em local limpo, seco, livre de luz solar e vapores químicos. Proibido reprocessar.

FORMA DE APRESENTAÇÃO DA EMBALAGEM

O Plug Adaptador com membrana autocicatrizante é fornecido embalada unitariamente em blister de PET e tyvek/PGC, posteriormente em caixas de papel com 100 peças.

DISTRIBUÍDO POR:**ROYAL TECH DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E VETERINÁRIA - LTDA**

Rua Professor João Soares Barcelos, 2085 - Hauer - Curitiba - PR

CEP: 81.670-080 | CNPJ: 25.239.410/0001-10

Site: www.royaltechimport.com.br

SAC (41) 99740-5140/ 3011-5509

E-mail: royaltech.vet.import@gmail.com

Resp. Téc.: Mv. Nicolas M. Pereira CRMV-PR 11.051

FABRICANTE:

Produto fabricado na China.