

GARRA ECG UNIVERSAL VETERINÁRIO (RTI)

REGISTRO MAPA

Produto isento de registro MAPA de acordo com art. 44 do regulamento aprovado pelo Decreto 5053 de 22/04/2004, IN 37 de 08/09/1999.

PRODUTO EXCLUSIVO PARA USO VETERINÁRIO

DADOS DO PRODUTO

Nome técnico: Garra ECG Universal Reutilizável Veterinário

Matéria Prima: Ponta: Metal

Corpo: Plástico

Produto Estéril: () Sim (X) Não

Validade: INDETERMINADA

DESCRIÇÃO

As Garras para ECG veterinário da Royal Tech Import são confeccionadas com componentes de alta qualidade para proporcionar um exame de eletrocardiograma com maior precisão. O conjunto modelo Jacaré possui em sua composição 5 peças iguais. Caracterizado como universal, possui a capacidade de conexão com diferentes tipos de terminações dos cabos de ECG.

INDICAÇÃO DE USO

As Garras tipo Jacaré são utilizadas como plug adaptador do cabo de ECG veterinário. Produto reutilizável e universal, possuindo 3 diferentes tipos de conexão. Adapta-se aos terminais: Pino clip 4.0mm, Pino Banana 4.0mm e Pino Din 3.0mm.


INSTRUÇÕES DE USO

- A sua utilização requer técnica especializada, sendo de uso exclusivo do profissional da área médica;
- Produto reutilizável;
- Modelo universal, possui 3 diferentes tipos de conexão: Pino clip 4.0mm, Pino Banana 4.0mm e Pino Din 3.0mm;
- As Garras devem ser limpas antes de cada uso;
- Necessário o preparo da pele do paciente antes da utilização das garras;
- O uso do gel condutor na pele do paciente e na garra, fornece uma leitura adequada do ECG;
- Use somente água destilada ou desmineralizada para limpeza;
- Após o uso iniciar a limpeza o quanto antes;
- Para limpeza mergulhe os instrumentais em água com solução apropriada para limpeza de instrumentos médicos na temperatura de 40° a 45° durante 10 a 20 minutos, em seguida escove os instrumentais com detergente ou sabão neutro;
- Enxaguar para remoção de espuma e resíduos;
- Após a limpeza seque completamente todos os itens;
- Manter em local seco e limpo, ao abrigo da luz solar e umidade.

APRESENTAÇÃO COMERCIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
GECGRTI	GARRA ECG UNIVERSAL (VETERINÁRIO) 5UN (RTI)

FOTO

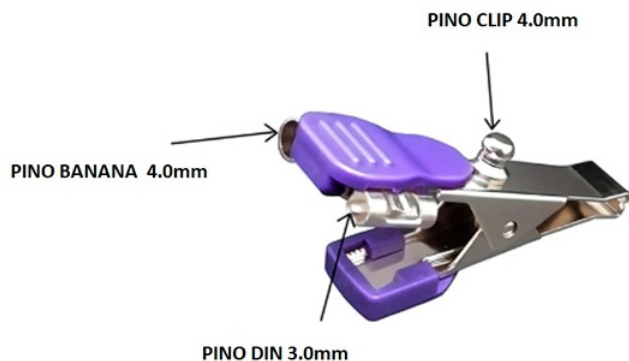

COMPOSIÇÃO

- Plástico e metal.

PRECAUÇÕES/ CONTRAINDICAÇÕES

- Não recomendado o uso para profissionais não capacitados;
- Não autoclavável;
- Após a higienização não deixar secando naturalmente, necessário secar todas as peças com uma toalha macia;
- Não utilizar lâ de aço para remover impurezas;
- Fazer a desinfecção utilizando produtos adequados de preferência sem FENOL.

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO

O produto deve ser armazenado em local de boa ventilação, limpo, ao abrigo de luz, em temperatura ambiente, umidade inferior a 70%, livre de contaminação e sem nenhum gás corrosivo.

FORMA DE APRESENTAÇÃO DA EMBALAGEM

Embalagem primária: Saco plástico.

Embalagem secundária: Caixa de papel cartão.

GARANTIA

- Garantia de 3 meses após o recebimento da mercadoria pelo cliente.
- (referente à garantia legal, nos termos do Art. 26, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor)

IMPORTADO E DISTRIBUÍDO POR:**ROYAL TECH DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E VETERINÁRIA - LTDA**

Rua Professor João Soares Barcelos, 2085 - Hauer - Curitiba - PR

CEP: 81.670-080 | CNPJ: 25.239.410/0001-10

SAC (41) 99740-5140/ 3011-5509

Site: www.royaltechimport.com.br

E-mail: royaltech.vet.import@gmail.com

Resp. Téc.: Mv. Nicolas M. Pereira CRMV-PR 11.051

FABRICANTE:

Produto fabricado na China.