

## **WRAPS PARA ESTERILIZAÇÃO TNT SMS 40G (RTI)**

### **REGISTRO MAPA**

Produto isento de registro no MAPA de acordo com o art.44 do regulamento aprovado pelo Decreto nº 5.053 de 22/04/2004, IN Nº 37 de 08/09/1999.

### **PRODUTO EXCLUSIVO PARA USO VETERINÁRIO**

### **DADOS DO PRODUTO**

Nome técnico: INVÓLUCRO PARA ESTERILIZAÇÃO AZUL SMS Pp40

Matéria Prima: 100 % polipropileno

Produto Estéril: ( ) Sim (x) Não

Validade: 2 Anos

### **FABRICANTE RECOMENDA USO ÚNICO**

### **DESCRIÇÃO**

Fabricados em TNT (Tecido Não Tecido 100% Polipropileno) com tecnologia SSMMS (Spunbond / Spunbond / Meltblown / Meltblown / Spunbond) apresentam excelente barreira contra partículas e macro agentes contaminantes, inclusive microbianos. O SSMMS combina ainda a alta eficiência de filtração bacteriana com adequada permeabilidade ao ar, permitindo a penetração do agente esterilizante e a sua posterior remoção.

### **INDICAÇÃO DE USO**

Indicado para embalar caixas, instrumentos cirúrgicos e outros materiais a serem esterilizados pelos processos de vapor saturado (autoclave) ou óxido de etileno (Eto), os quais devem permanecer embalados e devidamente acondicionados até seu uso.

**INSTRUÇÕES DE USO**

- Escolher o tamanho do invólucro de acordo com o material que será embalado (tamanho peso e outras características).
- Desdobrar o invólucro e colocar o material no centro.
- Envolver o material de forma que fique bem protegido.
- Fixar a embalagem com fita adesiva, identificando corretamente o conteúdo do pacote, data da esterilização e indicador químico para comprovação da eficácia da esterilização.
- Esterilizar os materiais seguindo as instruções dos fabricantes dos equipamentos de esterilização.
- Quando utilizar os instrumentos esterilizados, seguir a técnica asséptica para abertura da embalagem.
- Depois do uso, descartar como lixo infectante.

**APRESENTAÇÃO COMERCIAL**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
071.00.0032	WRAPS PARA ESTERILIZAÇÃO SMS 40G (75X75CM) PCT50UN (RTI)
071.00.0033	WRAPS PARA ESTERILIZAÇÃO SMS 40G (1.0X1.0M) PCT50UN (RTI)
071.00.0031	WRAPS PARA ESTERILIZAÇÃO SMS 40G (1.2X1.2M) PCT50UN (RTI)

**FOTO****\*ISENTO DE LÁTEX**

**COMPOSIÇÃO**

- 100% Polipropileno
- Atóxico
- Não Inflamável
- Uso único

**PRECAUÇÕES/ CONTRAINDICAÇÕES**

- O fabricante recomenda o uso único;
- Não utilizar se a embalagem estiver aberta ou danificada;
- Não utilizar após a data de validade;
- Atóxico e apirogênico;
- Descarte o dispositivo de acordo com protocolo da instituição.

**ARMAZENAGEM**

Armazenar em local limpo, seco, livre de luz solar e vapores químicos. Proibido reprocessar.

**FORMA DE APRESENTAÇÃO DA EMBALAGEM**

Embalagem plástica contendo 50 folhas.

**DISTRIBUÍDO POR:****ROYAL TECH DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E VETERINÁRIA - LTDA**

Rua Professor João Soares Barcelos, 2085 - Hauer - Curitiba - PR

CEP: 81.670-080 | CNPJ: 25.239.410/0001-10

Site: [www.royaltechimport.com.br](http://www.royaltechimport.com.br)

SAC (41) 99740-5140/ 3011-5509

E-mail: [royaltech.vet.import@gmail.com](mailto:royaltech.vet.import@gmail.com)

Resp. Téc.: Mv. Nicolas M. Pereira CRMV-PR 11.051

**FABRICANTE:**

Produto fabricado no Brasil.