

KIT GRAMPEADOR DE PELE PARA USO VETERINÁRIO (RTI)

REGISTRO MAPA

Produto isento de registro MAPA de acordo com art. 44 do regulamento aprovado pelo Decreto 5053 de 22/04/2004, IN 37 de 08/09/1999.

PRODUTO EXCLUSIVO PARA USO VETERINÁRIO

DADOS DO PRODUTO

Nome técnico: Grampeador de Pele e Removedor de Grampos Descartável

Matéria Prima: ABS e aço inoxidável

Produto Estéril: (X) Sim () Não

Método de Esterilização: Óxido de Etileno

Validade: 5 anos

FABRICANTE RECOMENDA USO ÚNICO

DESCRIÇÃO


O Kit grampeador de pele para uso veterinário da Royal Tech Import, é confeccionado com materiais de alta qualidade para proporcionar ao cirurgião médico veterinário um procedimento com desempenho e qualidade superior. A sutura mecânica da pele é estabelecida após a fixação dos grampos de aço inoxidável cirúrgico de tamanho W, com 4.5mm de altura e 7.0mm de largura. Utilizando a marcação na extremidade distal do dispositivo, o cirurgião estabelece o posicionamento correto para efetuar um disparo rápido e preciso. Para evitar possíveis erros na aplicação, o grampeador possui um mecanismo de alimentação de grampos sem interrupção, podendo realizar até 35 disparos por dispositivo. Após o período de cicatrização da pele, os grampos são retirados com o auxílio do removedor de pontos presente no kit.

INDICAÇÃO DE USO

Indicado o uso quando o cirurgião veterinário necessita de uma sutura mecânica da pele, de forma fácil, rápida e de qualidade. O dispositivo possui uma ótima ergonomia para sua aplicação, contando também com a função de pré-engatilhamento para o posicionamento exato do grampo.

INSTRUÇÕES DE USO

- A sua utilização requer técnica especializada, sendo de uso exclusivo do profissional da área médica;
- Verifique a integridade da embalagem e validade do dispositivo;
- Realizar uma avaliação criteriosa sobre a necessidade do uso da sutura mecânica;
- Com o auxílio de uma pinça cirúrgica, aproxime os bordos do ferimento de forma invertida;
- Segure com firmeza a empunhadura do grampeador, em seguida utilizando a seta presente na extremidade do dispositivo, realize o posicionamento correto no centro do ferimento e com 90 graus da superfície da pele;
- Acione o gatilho de forma firme e rápida; para continuar o procedimento solte totalmente o gatilho;
- Repita o procedimento anterior quantas vezes for necessário até o fechamento total do ferimento;
- Se houver necessidade, remova o grampo defeituoso ou mal posicionado por um novo;
- Após avaliar o tempo de cicatrização necessária para cada paciente e tipo de cirurgia, é necessário remover os grampos, utilizando o removedor de grampos presente no kit;
- Posicione o removedor de grampos no centro do grampo e realize o fechamento total das alças;
- Avalie se o ferimento realmente está cicatrizado, e retire todos os outros grampos;
- Destinar ao lixo hospitalar após o uso.

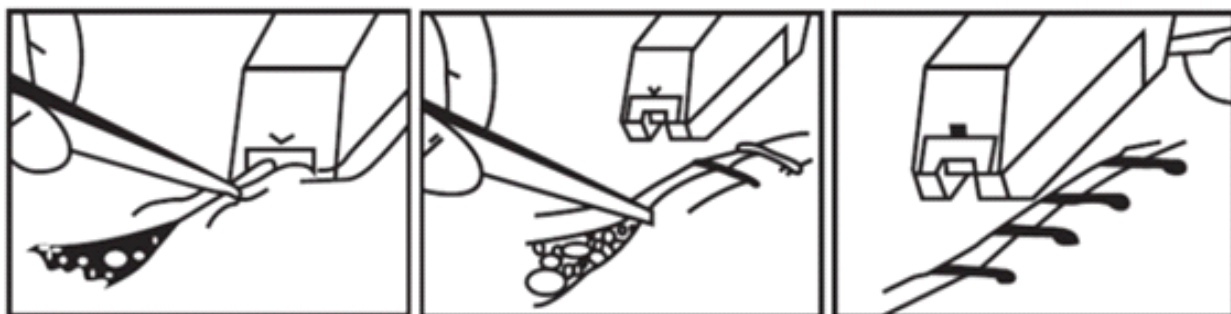

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Quantidade de itens por kit:
 - Grampeador: 1un;
 - Grampos: 35un modelo W;
 - Removedor de grampos: 1un.
- Peso:
 - Grampeador: 0.060kg;
 - Grampos: menor que 0.005kg;
 - Removedor de grampos: 0.025kg.
- Dimensões:
 - Grampeador: Altura 8.5cm, largura 1.7cm e comprimento 16.3cm;
 - Grampos: Altura 4.5mm, largura 7.0mm e diâmetro 0.6mm;
 - Removedor de grampos: Altura 6.5cm, largura 0.5cm e comprimento 14.5cm;

APRESENTAÇÃO COMERCIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
KGPRTI	KIT GRAMPEADOR DE PELE 35W E REMOVEDOR DE GRAMPOS (VETERINÁRIO) 1UN (RTI)

FOTO

COMPOSIÇÃO

- Grampeador: ABS e aço inoxidável;
- Grampos: Aço inoxidável;
- Removedor de grampos: ABS e aço inoxidável.

PRECAUÇÕES/ CONTRAINDICAÇÕES

- Não recomendado o uso para profissionais não capacitados;
- Não deve ser reutilizado ou reesterilizado;
- Não utilizar o produto se a embalagem estiver danificada ou violada ou se o produto tiver vencido.
- A reutilização irá causar contaminação cruzada;
- Utilizar somente para suturas de pele;
- Se a distância entre a pele suturada e a estrutura vital subjacente for inferior a 6.5mm, o grampeador de pele não deve ser usado;
- Descartar em lixo hospitalar após o uso.

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO

O produto deve ser armazenado em local de boa ventilação, limpo, ao abrigo de luz, em temperatura ambiente, umidade inferior a 70%, livre de contaminação e sem nenhum gás corrosivo.

FORMA DE APRESENTAÇÃO DA EMBALAGEM

- Embalagem primária:
 - Grampeador: Blister de polietileno e Tyvek/PGC;
 - Removedor de grampos: Papel grau cirúrgico.
- Embalagem secundária: Saco plástico.
- Embalagem terciária: Caixa de papel cartão.

IMPORTADO E DISTRIBUÍDO POR:**ROYAL TECH DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E VETERINÁRIA - LTDA**

Rua Professor João Soares Barcelos, 2085 - Hauer - Curitiba - PR

CEP: 81670-080 - CNPJ: 25.239.410/0001-10

SAC (41) 99740-5140/ 3011-5509

Site: www.royaltechimport.com.br

E-mail: royaltech.vet.import@gmail.com

Resp. Téc.: Mv. Nicolas M. Pereira CRMV-PR 11.051

FABRICANTE:

Produto fabricado na China.