

CÂNULA DE KLEIN PARA USO VETERINÁRIO (RTI)

REGISTRO MAPA

Produto isento de registro MAPA de acordo com art. 44 do regulamento aprovado pelo Decreto 5053 de 22/04/2004, IN 37 de 08/09/1999.

PRODUTO EXCLUSIVO PARA USO VETERINÁRIO.

DADOS DO PRODUTO

Nome técnico: CÂNULA DE KLEIN VETERINÁRIA REUTILIZÁVEL

Matéria Prima: Aço Inoxidável

Produto Estéril: () Sim (X) Não

Validade: INDETERMINADA

DESCRIÇÃO

A Cânula de Klein para uso veterinário da Royal Tech Import é confeccionada com aço inoxidável de alta qualidade para proporcionar um procedimento cirúrgico com maior precisão. Possui o comprimento de 20cm, circunferência de 2mm (3 French), ponta romba, orifícios laterais para saída da solução e uma conexão luer para uso de seringa de 20ml luer lock. Instrumento ideal para utilização na técnica de anestesia infiltrativa por tumescência. Produto comercializado não estéril, necessitando ser esterilizado antes do uso. Após ser utilizado o produto deverá ser lavado e seco imediatamente.

INDICAÇÃO DE USO

Instrumental cirúrgico confeccionado em aço inoxidável, indicado para uso médico com a finalidade de auxiliar os anestesiistas veterinários na técnica de anestesia infiltrativa por tumescência. É uma técnica de anestesia regional que envolve a infiltração de grandes volumes de uma solução anestésica diluída em baixas concentrações no tecido subcutâneo, promovendo anestesia local na área de interesse. A utilização da cânula de Klein para anestesia regional é considerada uma técnica segura e prática, frequentemente utilizada como complemento em procedimentos cirúrgicos como a mastectomia em animais, onde pode reduzir a necessidade de anestesia geral e proporcionar analgesia trans e pós-operatória.

INSTRUÇÕES DE USO

- A sua utilização requer técnica especializada, sendo de uso exclusivo do profissional da área médica;
- O instrumental deve ser limpo e esterilizado antes de cada uso;
- A esterilização pode ser realizada em autoclave:
 - Convencional: 121° durante 30 minutos;
 - Vácuo: 132° durante 4 minutos.
- Use somente água destilada ou desmineralizada na autoclave;
- Após o uso iniciar a limpeza dos instrumentais o quanto antes;
- Os instrumentais devem sempre ser abertos para limpeza e esterilização;
- Para limpeza mergulhe os instrumentais em água com temperatura de 40° a 45° durante 10 a 20 minutos, em seguida escove os instrumentais com detergente ou sabão neutro;
- Enxaguar para remoção de espuma e resíduos;
- Após a limpeza seque completamente todos os itens separadamente;
- É necessário embalar os instrumentais antes do próximo processo de autoclavagem;
- O uso regular de óleo previne endurecimento e corrosão;
- Manter em local seco e limpo, ao abrigo da luz solar e umidade;
- Transportar sem violar a embalagem;
- O uso regular de óleo previne endurecimento e corrosão;
- Manter em local seco e limpo, ao abrigo da luz solar e umidade;
- Transportar sem violar a embalagem.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Comprimento: 20cm;
- Diâmetro: 2.0 mm (3 French).


APRESENTAÇÃO COMERCIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
CKVRTI	CÂNULA DE KLEIN (2MMX20CM) PARA SERINGA DE 20ML (VETERINÁRIO) 1UN (RTI)

FOTO:



CÂNULA COM 20CM DE COMPRIMENTO E 2MM DE DIÂMETRO

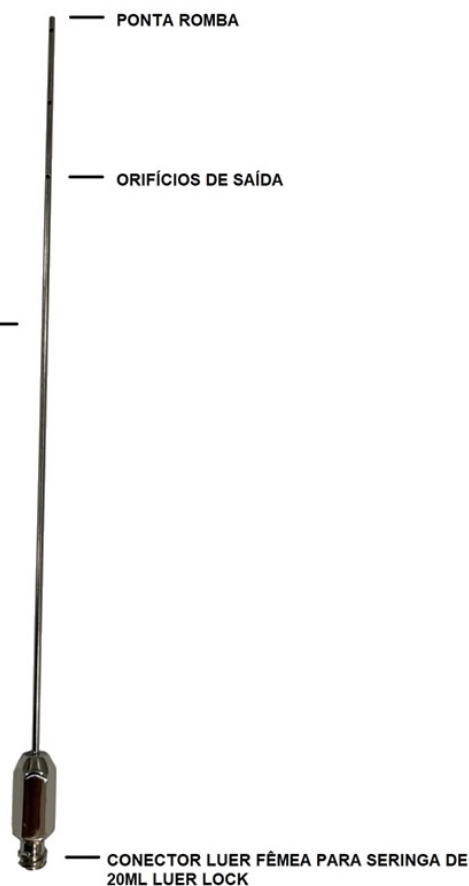

COMPOSIÇÃO

- Aço Inoxidável.

PRECAUÇÕES/ CONTRAINDICAÇÕES

- Não recomendado o uso para profissionais não capacitados;
- Manter a manutenção da autoclave em dia, equipamentos desregulados podem apresentar umidade residual a qual poderá provocar manchas e corrosão;
- Se os instrumentos forem esterilizados sem estarem limpos, as manchas destes podem ficar marcadas, tornando-se permanentes devido à alta temperatura durante a esterilização;
- Fazer a desinfecção utilizando produtos adequados de preferência sem FENOL;
- Não misturar instrumentais em aço inoxidável com outros metais, como alumínio, latão ou cobre. O contato com os outros metais pode causar manchas e gravações, devido às alterações eletroquímicas;
- Não utilizar lâ de aço para remover impurezas.

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO

O produto deve ser armazenado em local de boa ventilação, limpo, ao abrigo de luz, em temperatura ambiente, umidade inferior a 70%, livre de contaminação e sem nenhum gás corrosivo.

FORMA DE APRESENTAÇÃO DA EMBALAGEM

- Embalagem primária: Saco plástico;
- Embalagem secundária: Caixa de papel cartão.

IMPORTADO E DISTRIBUÍDO POR:**ROYAL TECH DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E VETERINÁRIA - LTDA**

Rua Professor João Soares Barcelos, 2085 - Hauer - Curitiba - PR

CEP: 81670-080 - CNPJ: 25.239.410/0001-10

SAC (41) 99740-5140/ 3011-5509

Site: www.royaltechimport.com.br

E-mail: royaltech.vet.import@gmail.com

Resp. Téc.: Mv. Nicolas M. Pereira CRMV-PR 11.051

FABRICANTE:

Produto fabricado no Paquistão.