

BRAÇADEIRA VETERINÁRIA DESCARTÁVEL 1TUBO (RTI)

REGISTRO MAPA

Produto isento de registro MAPA de acordo com art. 44 do regulamento aprovado pelo Decreto 5053 de 22/04/2004, IN 37 de 08/09/1999.

PRODUTO EXCLUSIVO PARA USO VETERINÁRIO

DADOS DO PRODUTO

Nome técnico: Braçadeira Veterinária Descartável

Matéria Prima: Braçadeira – Tecido não tecido

Velcro – Poliéster e Nylon

Válvula: TPU

Tubo - PVC

Conectores – Plástico

Produto Estéril: () Sim (x) Não

Validade: Indeterminada

DESCRIÇÃO

A braçadeira veterinária descartável da Royal Tech Import é confeccionada com componentes de alta qualidade para proporcionar uma aferição da pressão arterial não invasiva fidedigna. Possui na sua constituição 2 conectores diferentes por braçadeira que possibilita o uso em diversos esfigmomanômetros ou monitores multiparamétricos do mercado. Produto isento de látex.

INDICAÇÃO DE USO

As braçadeiras descartáveis veterinárias com 1 tubo são indicadas para auxiliar na aferição da pressão arterial não invasiva, por meio do uso de um doppler e esfigmomanômetro ou em conjunto com um monitor multiparamétrico.

INSTRUÇÕES DE USO

- A escolha da braçadeira correta para cada perfil de paciente evita uma aferição não fidedigna, assim evitando um tratamento inadequado;
- Coloque a braçadeira aberta em torno da face interna do membro a ser aferido a pressão;
- Posicione o símbolo de artéria (ARTERY) da braçadeira sobre a artéria presente nos membros anteriores, posteriores ou na cauda do paciente;
- Se a linha indicadora (INDEX LINE) estiver dentro da faixa indicadora da circunferência do membro (ALCANCE), a circunferência da braçadeira está adequada, do contrário selecione outra braçadeira mais apropriada para a circunferência do membro;
- Fixe a braçadeira confortavelmente rente ao paciente. Retire a braçadeira imediatamente após aferir a pressão arterial.

APRESENTAÇÃO COMERCIAL


CÓDIGO	DESCRIÇÃO
KITBVD	KIT BRAÇADEIRA VETERINÁRIA DESCARTÁVEL (N.2 E N.3) 1TUBO (RTI)
V1012N	BRAÇADEIRA VETERINÁRIA DESCARTÁVEL (N.2 - 4-8CM) 1TUBO (RTI)
V1013N	BRAÇADEIRA VETERINÁRIA DESCARTÁVEL (N.3 - 6-11CM) 1TUBO (RTI)

CONECTOR SL**CONECTOR HP**


*INCLUSO DOIS CONECTORES POR BRAÇADEIRA

FOTO:

BRAÇADEIRA N.2

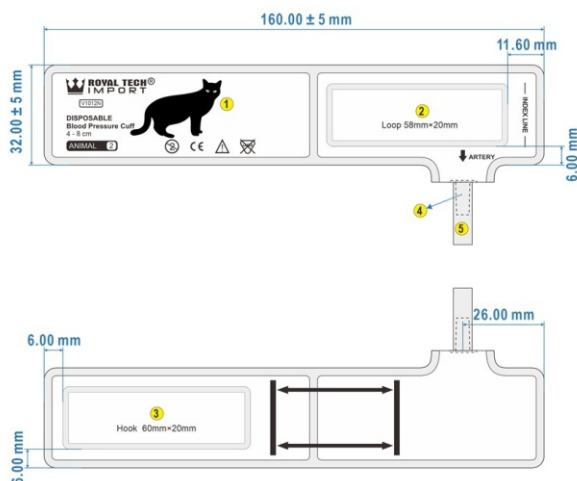

BRAÇADEIRA N.3

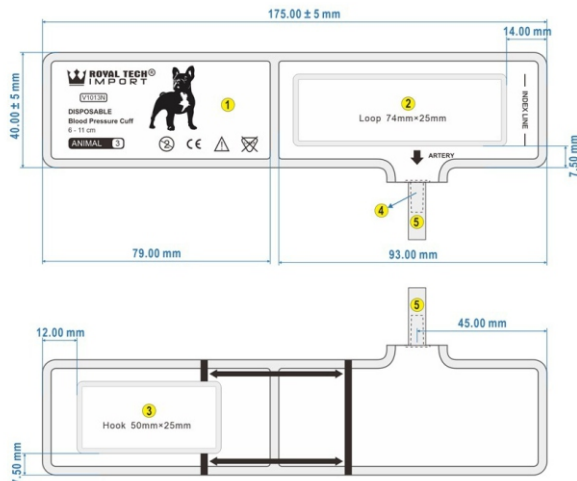

COD	DESCRIÇÃO
1	Tecido não tecido branco
2	Tecido de velcro branco: C=58mm×L=20mm
3	Gancho de injeção de PVC branco: C=60mm×L=20mm
4	Válvula tipo bico de TPU transparente: ID = 2,5 mm, OD = 4 mm, H = 11 mm
5	Tubo de ar de PVC branco: diâmetro interno 3mm, diâmetro externo 6mm, comprimento do tubo 200mm

COD	DESCRIÇÃO
1	Tecido não tecido branco
2	Tecido de velcro branco: C=74mm×L=25mm
3	Gancho de injeção de PVC branco: C=50mm×L=25mm
4	Válvula tipo bico de TPU transparente: ID = 2,5 mm, OD = 4 mm, H = 11 mm
5	Tubo de ar de PVC branco: diâmetro interno 3mm, diâmetro externo 6mm, comprimento do tubo 200mm

COMPOSIÇÃO

- Isento de látex;
- Atóxico;
- Não Inflamável;
- Braçadeira – Tecido não tecido;
- Velcro - Poliéster e Nylon;
- Válvula - TPU;
- Tubo - PVC;
- Conectores - Plástico.

PRECAUÇÕES/ CONTRAINDICAÇÕES

- Em membros contendo acessos vasculares, ferimentos ou curativos não utilizar para o procedimento de aferição da pressão;
- A insuflação da braçadeira pode bloquear temporariamente a circulação do sangue, o que pode causar lesões ao paciente;
- Não use a braçadeira se houver qualquer sinal de dano do produto;
- Não movimentar o membro durante a aferição;
- Escolher com critério o tamanho correto da braçadeira;
- Observar se o tubo de conexão não está comprimido ou dobrado assim evitando a pressurização da braçadeira e possíveis lesões ao paciente

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO

O produto deve ser armazenado em local de boa ventilação, limpo, ao abrigo de luz, em temperatura ambiente, umidade inferior a 70%, livre de contaminação e sem nenhum gás corrosivo.

FORMA DE APRESENTAÇÃO DA EMBALAGEM

Embalagem primária: Saco plástico individual para cada braçadeira.
Embalagem secundária: Saco plástico.

IMPORTADO E DISTRIBUÍDO POR:**ROYAL TECH DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E VETERINÁRIA - LTDA**

Rua Professor João Soares Barcelos, 2085 - Hauer - Curitiba - PR

CEP: 81.670-080 | CNPJ: 25.239.410/0001-10

E-mail: royaltech.vet.import@gmail.com

Site: www.royaltechimport.com.br

SAC (41) 99740-5140/ 3011-5509

Resp. Téc.: Mv. Nicolas M. Pereira CRMV-PR 11.051

FABRICANTE:

Produto fabricado na China.