

KIT SUTURA AVANÇADO VETERINÁRIO COM SIMULADOR DE PELE (RTI)**REGISTRO MAPA**

Produto isento de registro MAPA de acordo com art. 44 do regulamento aprovado pelo Decreto 5053 de 22/04/2004, IN 37 de 08/09/1999.

PRODUTO EXCLUSIVO PARA USO VETERINÁRIO**DADOS DO PRODUTO**

Nome técnico: KIT SUTURA AVANÇADO VETERINÁRIO COM SIMULADOR DE PELE

Matéria Prima: Instrumental: Aço Inoxidável

Simulador de pele: Silicone

Fio cirúrgico: Nylon

Lâmina bisturi: Aço carbono

Produto Estéril: () Sim (X) Não

Validade: INDETERMINADA

DESCRIÇÃO

O kit de sutura avançado da Royal Tech Import é confeccionado com componentes de alta qualidade para proporcionar um procedimento cirúrgico com maior precisão. Possui em sua composição um simulador de pele em silicone com diversos cortes para auxiliar os treinamentos das suturas. Produto comercializado não estéril, necessitando ser esterilizado antes do uso caso for utilizado em pacientes. Após ser utilizado o produto deverá ser lavado e seco imediatamente.

INDICAÇÃO DE USO

O kit de sutura avançado da Royal Tech Import é indicado para o uso em cirurgias ou em treinamentos. Possui em sua composição uma linha completa de instrumentais, lâmina de bisturi, fio cirúrgico e um simulador de pele em silicone para os treinamentos.

INSTRUÇÕES DE USO

- A sua utilização requer técnica especializada, sendo de uso exclusivo do profissional da área médica;
- Antes de utilizar o kit em pacientes os instrumentais devem ser limpos e esterilizados;
- A esterilização pode ser realizada em autoclave:
 - Convencional: 121° durante 30 minutos;
 - Vácuo: 132° durante 4 minutos;
- Use somente água destilada ou desmineralizada na autoclave;
- Após o uso iniciar a limpeza dos instrumentais o quanto antes;
- Os instrumentais devem sempre ser abertos para limpeza e esterilização;
- Para limpeza mergulhe os instrumentais em água com temperatura de 40° a 45° durante 10 a 20 minutos, em seguida escove os instrumentais com detergente ou sabão neutro;
- Enxaguar para remoção de espuma e resíduos;
- Após a limpeza seque completamente todos os itens separadamente;
- É necessário embalar os instrumentais antes do próximo processo de autoclavagem;
- O uso regular de óleo previne endurecimento e corrosão;
- Manter em local seco e limpo, ao abrigo da luz solar e umidade;
- Transportar sem violar a embalagem.

APRESENTAÇÃO COMERCIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
KSVRTI	KIT SUTURA AVANÇADO COM SIMULADOR DE PELE (18 ITENS) VETERINÁRIO (RTI)

FOTO

COMPOSIÇÃO

- Instrumental: Aço Inoxidável;
- Simulador de pele: Silicone;
- Fio cirúrgico: Nylon;
- Lâmina bisturi: Aço carbono.

KIT

COMPOSIÇÃO DO KIT	QTDE
CABO PARA BISTURI N.3	1UN
CABO PARA BISTURI N.4	1UN
ESTOJO PERFURADO 18X8X5CM	1UN
FIO DE NYLON (2-0) 3.0CM - 3/8 TRG - 45CM	1UN
FIO DE NYLON (3-0) 3.0CM - 3/8 TRG - 45CM	1UN
FIO DE NYLON (4-0) 2.5CM - 3/8 TRG - 45CM	1UN
LÂMINA BISTURI AÇO CARBONO N.11	1UN
LÂMINA BISTURI AÇO CARBONO N.15	1UN
LÂMINA BISTURI AÇO CARBONO N.24	1UN
PINÇA ANATÔMICA DENTE DE RATO 16CM	1UN
PINÇA ANATÔMICA DISSECÇÃO 16CM	1UN
PINÇA HALSTEAD MOSQUITO CURVA 12.5CM	1UN
PINÇA HALSTEAD MOSQUITO RETA 12.5CM	1UN
PORTA AGULHA MAYO HEGAR 16CM	1UN
TESOURA MAYO STILLE 14CM RETA	1UN
TESOURA METZENBAUM CURVA 14.5CM	1UN
TESOURA SPENCER 11.5CM	1UN
SIMULADOR DE PELE EM SILICONE	1UN

PRECAUÇÕES/ CONTRAINDICAÇÕES

- Não recomendado o uso para profissionais não capacitados;
- Manter a manutenção da autoclave em dia, equipamentos desregulados podem apresentar umidade residual a qual poderá provocar manchas e corrosão;
- Se os instrumentos forem esterilizados sem estarem limpos, as manchas destes podem ficar marcadas, tornando-se permanentes devido à alta temperatura durante a esterilização;
- Fazer a desinfecção utilizando produtos adequados de preferência sem FENOL;
- Não misturar instrumentais em aço inoxidável com outros metais, como alumínio, latão ou cobre. O contato com os outros metais pode causar manchas e gravações, devido alterações eletroquímicas;
- Não autoclavar o simulador de pele em silicone, as lâminas de bisturi e os fios cirúrgicos;
- Não utilizar lã de aço para remover impurezas.

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO

O produto deve ser armazenado em local de boa ventilação, limpo, ao abrigo de luz, em temperatura ambiente, umidade inferior a 70%, livre de contaminação e sem nenhum gás corrosivo.

FORMA DE APRESENTAÇÃO DA EMBALAGEM

Embalagem primária: Saco plástico.

Embalagem secundária: Caixa de papel cartão.

GARANTIA

Garantia de 3 meses após o recebimento da mercadoria pelo cliente; (referente à garantia legal, nos termos do Art. 26, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor)

IMPORTADO E DISTRIBUÍDO POR:**ROYAL TECH DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E VETERINÁRIA - LTDA**

Rua Professor João Soares Barcelos, 2085 - Hauer - Curitiba - PR

CNPJ: 25.239.410/0001-10

SAC (41) 99740-5140/ 3011-5509

Site: www.royaltechimport.com.br

E-mail: royaltech.vet.import@gmail.com

Resp. Téc.: Mv. Nicolas M. Pereira CRMV-PR 11.051

FABRICANTE:

Produto fabricado no Paquistão.